

Link do produktu: <https://olenka.net.pl/katarek-travel-2w1-aspirator-do-nosa-od-urodzenia-gratis-masc-15g-kosmetyczka-p-2228.html>



Katarek Travel 2w1, Aspirator do Nosa od urodzenia + GRATIS Maść 15g + Kosmetyczka

Cena	63,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905279336155
Producent	Katarek

Opis produktu

Opis produktu

Katarek Travel to rozwiązanie 2w1 do aspiracji ustnej i do odkurzacza u dzieci od 1 dnia życia. Korzystanie z aspiratora jest o tyle istotne, że zalegająca wydzielina może powodować dyskomfort i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych nosa, uszu, gardła i dróg oddechowych. Wersja do odkurzacza poradzi sobie z gęstym i zalegającym katarzem. W podróży, na spacerze kiedy nie ma możliwości użycia odkurzacza z pomocą przychodzi wersja ustna aspiratora, która sprawdzi się także w codziennej pielęgnacji. Opakowanie w formie kosmetyczki to praktyczne rozwiązanie w podróży.

Zastosowanie

Usuwanie wydzieliny z nosa u dzieci.

Sposób użycia

- Efektywne użytkowanie aspiratora możliwe jest przy zachowaniu naturalnej postawy ciała. Dobrze, jeżeli osoba dorosła korzystająca z urządzenia trzyma dziecko na kolanach lub w ramionach.
- Końcówkę aspiratora należy umieścić w taki sposób, aby zablokowała jedno nozdrze i przytrzymać ją przez kilka sekund, monitorując wydobycie śluzu.
- Poprzednie kroki należy powtórzyć na tym samym lub drugim nozdrzu.
- Czas odciągania wynosi około 5 sekund na jedno nozdrze.
- Po zakończeniu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem zawartym w instrukcji.
- Powtarzaj odciąganie 2-3 razy dziennie lub tak często, jak jest to konieczne.

Aspirator podłączony do odkurzacza:

- połącz komorę z końcówką, wąski koniec aspiratora włóż do łącznika, a jego stożkowy koniec włóż do rury ssącej odkurzacza,
- weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana,
- końcówkę aspiratora przyłóż do otworu nosowego na kilka sekund i odciągaj wydzielinę,
- czynność powtórz na drugiej dziurce,
- wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazówkami.

Aspirator ustny:

- połącz komorę z końcówką, a do łącznika włóż ustnik,
- weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana,
- końcówkę aspiratora przyłóż do otworu nosowego, ustnik włóż do ust i odciągaj wydzielinę,
- czynność powtórz na drugiej dziurce,
- po oczyszczeniu noska wyczyść aspirator zgodnie ze wskazówkami.

Cechy produktu

- aspirator może być używany z odkurzaczem lub za pomocą ust,
- kosmetyczka podróżna ułatwiająca transport,
- przydatny zarówno w przypadku wodnistego kataru, jak i codziennej higienizacji nosa.